

- ✓ **Hohe Flächenleistung, niedrige Kosten, weniger Abfall**
- ✓ **Optimale Verpackung mit einfacher Tuchentnahme**
- ✓ **Sichere Desinfektion durch umfassende Wirkspektren**
- ✓ **Handliches Tuchformat zur 3 m<sup>2</sup> Flächenanwendung**
- ✓ **Variable materialschonende Flächendesinfektionslösungen**



## TEMDEX® Wipes roll

### Produktbeschreibung

Tuchrollensystem für die professionelle Flächendesinfektion mit fertig getränkten Tüchern. Das Desinfektionssystem erfüllt sämtliche Anforderungen für anspruchsvolle Medizinprodukte und optimale Desinfektionserfolge bei hoher Produktsicherheit. Durch das spezielle Imprägnierungsverfahren wird die Desinfektionsleistung sichergestellt und die Materialeigenschaften gewährleisten eine Flächenleistung von mindestens 3 m<sup>2</sup> Oberflächenbenetzung. Die hochwertige und griffige Tuchqualität bringt gleichzeitig sehr gute Reinigungseigenschaften mit. Das Tuch besitzt hervorragende Saugeigenschaften und gibt das gespeicherte Desinfektionsmittel gleichmäßig auf die vorgesehene Fläche ab.

Die Tücher werden in einer geschlossenen Sicherheitsverpackung ausgeliefert, die mit einer wiederverschließbaren Lasche ausgestattet ist. Dadurch wird ein Verdunsten der Desinfektionslösung minimiert, auch wenn die Tücher über einen längeren Zeitraum einzeln entnommen werden. Nutzung im Spendereimer in der Sicherheitsverpackung möglich. Das Tuchrollensystem ist in verschiedenen Varianten erhältlich.

### Anwendungshinweise

Das Anbruchdatum auf der Öffnungsglasche mit Unterschrift vermerken. Die Packung lässt sich für die Flächendesinfektionsanwendung der angegebenen Tuchabrisse beliebig öffnen und schließen. Die optimale Tuchentnahme erfolgt beidhändig und ist für Links- wie Rechtshänder durch die senkrecht angebrachte Öffnungsglasche bzw. Öffnung von oben nach unten ausgelegt. Oberflächen sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung achten, um eine optimale Desinfektionswirkung zu gewährleisten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggfls. mit Einmaltuch nachwischen. Nach Gebrauch die Wipes der Abfallentsorgung zuführen. Das Tragen von Handschuhen beim Umgang mit Desinfektionsmitteln wird empfohlen. Nicht zur Hausreinigung verwenden.

## Das Tuchrollensystem ist in verschiedenen Varianten erhältlich:

### TEMDEX® WD plus wipes roll

Alkoholfreie Wischdesinfektionstücher für den medizinischen Bereich, VAH gelistet, materialschonende Desinfektionslösung mit reinigenden Eigenschaften und sehr schnellen Ergebnissen. Getränkte Desinfektionstuchrolle im Refill mit Entnahmelasche, Rolle mit 90 Abrissen, 28 x 32 cm Halbfalz, 50g/m<sup>2</sup> weiße Textilfaser, Flächenleistung 3m<sup>2</sup>/Tuch, Medizinprodukt. Geeignet für Spendereimerwie TEMDEX 5,7 Liter und vergleichbare.

### TEMDEX® SD universal wipes roll

Alkoholische Schnelldesinfektionstücher für den medizinischen Bereich, VAH gelistet, Schnelldesinfektionslösung mit materialschonenden Eigenschaften durch niedrige Alkoholkonzentration. Getränkte Desinfektionstuchrolle im Refill mit Entnahmelasche, Rolle mit 90 Abrissen, 28 x 32 cm Halbfalz, 50g/m<sup>2</sup> weiße Textilfaser, Flächenleistung 3m<sup>2</sup>/Tuch, Medizinprodukt. Geeignet für Spendereimerwie TEMDEX 5,7 Liter und vergleichbare.

## Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter [www.temca.eu](http://www.temca.eu) - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst:

Telefon: 036695 – 322 - 0 E-Mail: [info@temca.eu](mailto:info@temca.eu).

## Umweltinformationen

Die TEMCA GmbH & Co. KG produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

